

Mimitakara[®]



デジタル首かけ型集音器

goodHearing A1 / UP-6EB3

取扱説明書

保証書在中

Ⅰ はじめに Ⅰ

このたびは、Mimitakara製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

目次

| | |
|------------------|----|
| 付属品 | 3 |
| クラウドサービスについて | 4 |
| 安全上のご注意 | 5 |
| 本体・付属品取り扱いについて | 6 |
| 無線(WiFi)機能搭載した機種 | 12 |
| 36か月未満の乳幼児について | 13 |
| アプリより調節を行う場合 | 14 |
| フィッティングを行う専門家の方へ | 15 |
| 運送及び保管について | 16 |
| 初めてお使いになる方に | 17 |
| 各部の名称 | 19 |
| 充電の準備 | 20 |
| 電源のON・OFF | 22 |
| 使用方法 | 23 |
| Bluetooth設定 | 26 |
| LEDインジケータについて | 28 |
| お手入れ方法 | 29 |
| 故障かと思われたときは | 31 |
| 通知音について | 33 |
| 仕様・性能 | 34 |
| 保証・アフターサービス | 35 |

■ 付属品 ■

製品本体の他に下記の付属品が同梱されています。
万一、不足の物がありましたら、お手数ですが、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ① 本体
※イヤチップLサイズ2個が装着されています。
- ② イヤチップ S×2; M×2; XL×2
- ③ ブラシ
- ④ USBケーブル



！ クラウドサービスについて ！

本製品は専用アプリを使って、スマートフォンと接続・音量調節、またはオンラインサポートなどの操作が行えます。

mimitakaraの公式サイトから、専用アプリケーションをダウンロードしてください。

<https://www.mimitakara.jp/download/app>



安全上のご注意 | 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく事を説明しています。



警告 死亡や重傷を負う恐れがある。



注意 軽傷を負う、財産の損害が発生するなどの恐れがある。

※お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



禁止(してはいけないこと)の内容です。



実行しなければならない内容です。

安全にお使いいただくために

自分で操作ができない方、自分で意思表示ができない方の一人での使用はしないでください。必ずサポートする方の立ち合いの元でご使用ください。

また、36か月未満の乳幼児へは使用しないでください。

！ 本体・付属品取り扱いについて ！



自分自身に適した製品をご使用ください。
不適な製品を使用すると、耳が痛くなる原因となります。



分解や改造をしないでください。
火災や感電の原因になります。



製品が破損した場合は、使用しないでください。
火災や感電の原因になります。



医療機器の近く(手術室、集中治療室など)では使用しないでください。
製品の電波が医療機器に影響を及ぼす場合があります、誤動作による事故の原因となります。



高温になる場所(自動車のダッシュボード・直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)や熱がこもる場所で使用・充電・保管・放置しないでください。
製品外装や内部部品の劣化、火災の原因となります。



濡れた手で本体を操作したり、水や湯気がかかる場所で使用しないでください。

製品部品劣化や火災・感電の原因になります。



本体、電池単体および付属品（イヤチップなど）を子どもの手の届く所やペットの周辺に保管しないでください。

万が一、誤って飲み込んでしまった場合は、ただちに医師にご相談ください。

電池の誤飲によって化学やけどを引き起こす可能性があります。



体に異常があるときは使用をやめてください。

頭痛・めまい・耳の痛みや皮膚の炎症（はれ・湿疹など）などが起きた場合、使用を中止し、販売店又は医療機関にご相談ください。



音量を上げすぎないでください。

大きすぎる音量は、聞こえを悪くする原因となります。



充電は付属のUSBケーブルを使ってください。

本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、発火、破裂の原因となります。

 **注意**



強い衝撃を与えたり、落としたりしないようにしてください。

製品部品破損、故障の原因になります。



過度の湿気や温度を避けてください。

製品部品劣化や火災・感電の原因になります。

レントゲン撮影、CTスキャン等の画像診断機器は本体に悪影響を及ぼします。



これらの機器を用いた撮影を受ける前には本体を外し、撮影室の外に置いてください。

またMRIスキャンは強い磁力を用いますので、MRI室に入る前には必ずお外してください。

USBケーブルを破損するようなことはしないでください。



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



濡れた手でUSBケーブルの抜き差しはしないでください。

感電の原因となります。



環境騒音抑制機能を搭載した機種は、周囲の環境に応じて自動的に騒音抑えます。

車の音や鳴るクラクション(警告音)が聞こえにくいことがあります。



製品は国際基準に従って電磁波干渉について徹底的に品質検査が行われています。

一部特定の装置の近くでは、電磁干渉が発生する場合があります。



使用前に音量を確認してください。

使い始めは音量を小さめにして、慣れてきたら徐々に音量を調節してお使いください。



不要になった本体は、各自治体指定の方法により処分をしてください。



航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。



電磁波による干渉にご注意ください。

製品の近くでは電磁波による干渉が起きる可能性があります。



運転中に操作しないでください。

事故の原因となります。



使用前に、イヤチップが外れかけていないか確認してください。

イヤチップが完全にはめ込まれていないと、抜け落ちて耳に残ります。イヤチップの交換は販売店にご相談ください。



電子レンジや高圧容器に入れないでください。

火災や感電の原因となります。



USBケーブルは確実に根元まで差し込んでください。

- ・差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
- ・傷んだUSBケーブルは使用しないでください。

心臓ペースメーカーの装着部に近づけないでください。



本体からの電波が心臓ペースメーカーの作動に影響を及ぼす場合がございます。

心臓ペースメーカーに少なくとも10cm以上離してください。

下記の項目に該当する場合は、本製品を使用する前に耳鼻咽喉科医にご相談ください。

- 生まれつきの変形・奇形。
- 過去90日以内に耳だれがあった場合。
- 過去90日以内に突発性または進行性の聴力低下があった場合。
- 過去90日以内に左右どちらかの耳に聴力低下があった場合。
- 急性または慢性のめまいがある方。
- 耳の治療中の方、耳の中や耳の後の痛みまたは炎症がある場合。
- 聴力像の500Hz、1000Hzと2000Hzの差が15dB又は15dB以上の方。
- 耳の中に痛み、またはかゆみがあるとき。
- 耳垢、または異物の集積が明らかなき。



無線(WiFi)機能搭載した機種



i 国の制度によって、無線装置(WiFi)の使用制限があります。
詳しくは現地の法律をご確認ください。



国の制度によって、一部決まったエリア内での使用が禁止されていますので、ご確認の上ご使用ください。



本製品は国際電波対応規格に適合したものですが、電磁波による干渉が起きる可能性があります。
その場合は干渉元から離れてください。

！ 36か月未満の乳幼児について ！



警告



36か月未満の乳幼児の場合は特殊専用機種になるため、通常の機種を使用しないでください。

アプリより調節を行う場合



注意

アプリより本体の音量調節などを行う場合、端末が短時間で聞こえる制御信号を出す場合があります。



端末の音量設定が大きすぎると、聞こえを悪くする原因となります。

その場合、スピーカーに近づけないでください。または、複数の端末を同時に使用しないでください。

！ フィッティングを行う専門家の方へ ！



注意



132dB SPLを超える音圧レベルは、残存聴力を害する恐れがあるのでご注意ください。

｜ 運送及び保管について ｜

本体の運送や保管は下記の範囲内で行ってください。

| | 運送 | 保管 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 温度 | 10~40℃ (50~104°F) | -20~60℃ (-4~140°F) |
| 相対湿度 | 10~80℃ | 5~90℃ |

｜ 廃棄方法 ｜

1. 不要になった本体は、各自治体指定の方法により処分をしてください。

Ⅰ 初めてお使いになる方に Ⅰ

製品を着けてすぐには言葉の内容が聞き取りにくいものです。慣れるまでは通常は1~2週間以上かかりますが、毎日疲れない程度に、使い続けてください。

第一週目

はじめは静かな家の中などで使用し、製品を着ける事に慣れてください。最初は自分の声に違和感がありますが、本などを声に出して読んだりして違和感がなくなるまで練習します。無理せず、疲れたらすぐ休んでください。

推奨時間：毎日2時間まで。

目的：製品に慣れるため。

第二週目

静かな場所で家族や友達と対談してください。

推奨時間：毎日3時間まで。

目的：人との会話を練習するため。

第三週目

複数の身近な人と会話する練習をしてください。

推奨時間：毎日4時間まで。

目的：どの人が話をしているか聞き分ける練習をするため。

第四週目

4～5人の人と話をしてみます。慣れてきたら、外の環境音を聞く練習をしてください。

推奨時間：毎日5時間まで。

目的：騒がしい環境の中でうまく人の話を聞き取るため。

※注意

初めから、音量を上げすぎないようにしてください。

音が小さかったり、周囲の音が大きく感じたら、アプリで音量調節または聴力テストを行ってください。

調節が不適切な場合、耳を痛める原因となります。調節について分からない事がありましたら、下記にお問い合わせください。

サポートセンター

電話：052-602-7772

ホームページ

www.mimitakara.jp

お問い合わせ

service@mimitakara.jp

LINE公式アカウント



@goodHearingアプリ



各部の名称



① イヤホン

⑥ イヤホン収納

② USB端子差し込み口

⑦ 左耳音量調節

③ LEDインジケータ

⑧ 右耳音量調節

④ 電源スイッチ

⑨ モード切替(M) / Bluetooth

⑤ マイク

Ⅰ 充電の準備 Ⅰ

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSB端子差し込み口に接続し、もう一方のプラグを市販のUSB ACアダプターに接続します。



2. USB ACアダプターを電源コンセントに接続するとLEDインジケータが赤色に点灯します。
充電が完了すると青色の点灯に変わります。



 **注意**

- 周囲の温度が5°C~40°Cの間で充電してください。
 - 電池が無くなりかけると、インジケータが赤色に点灯しますので、すみやかに充電を開始してください。
 - フル充電するには約4時間かかります。初めて使用するときは、4時間充電する事をお勧めします。
 - 長期間使用しない場合でも、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、週に1度は充電してください。
 - 使用環境により異なりますが、内蔵充電電池の充放電回数の目安は約500回です。内蔵充電電池は充放電回数や使用期間、ご使用の環境などによって能力が低下し、充電電池の使用時間が減っていきます。フル充電した状態から使用できる時間が使用開始当初と比較して半分ほどになりましたら、交換の目安にしてください。
- 内蔵充電電池交換する場合、販売店にご相談ください。

！ 電源のON・OFF ！

1. 電源スイッチを「ON」側にスライドすると電源がオンになります。



LEDインジケータ

電源スイッチ
(ON / OFF)

2. 電源スイッチを「OFF」側にスライドすると電源がオフになります。

■ 使用方法 ■

本体の着けかた

1. 本体を首にかけ、左右鎖骨の位置になるようにセットします。
2. イヤチップを耳あなに入れます。
3. 電源スイッチをオンにします。




- 電源入れると、本体はあらかじめ調節された音量に自動的に設定されます。
- 電源入れる際に、イヤホンを手で握るとハウリング音（ピーやキーという音）が発生する場合があります。イヤホンに耳にセットしていただくとこのハウリング音は止まります。

モード切り替え

本体左右の **(M)** モード切替ボタンを押すとお知らせ音が鳴り、モードが切り替わられます。

モードは一般、会話、ノイズキャンセリングの3種類があります。

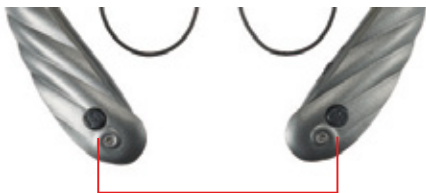

- 1. 一般モード:** 一般の環境下で使用できます。
- 2. 会話モード:** 周囲の音を軽減してくれることで、会話に集中することができます。
- 3. ノイズキャンセリングモード:** 運転音や街の雑踏といった持続性のあるノイズを軽減してくれることで、騒音の中でも会話が聞き取りやすくなります。

〈切り替え方法〉

- ・電源オン⇒前回最後に切り替わったモード
- ・お知らせ音:
 - 「ビー」⇒一般モード
 - 「ビー、ビー」⇒会話モード
 - 「ビー、ビー、ビー」⇒ノイズキャンセリングモード

※お知らせ音は製品を装着した状態でご確認ください。

音量調整

本体の音量調整ボタンを押してお好みの音量に合わせてください。

音量調整ボタンの「+」を押すと音が大きくなります。

音量調整ボタンの「-」を押すと音が小さくなります。



音量↑「+」

音量↓「-」

- 音量を調整した時、お知らせ音でお知らせすることがあります。
- 音量調整後にすぐに電源を切ると設定が保存されない場合があります。音量調整後約5秒を待ってから電源の操作をすることをお勧めします。
- 音量を上げすぎないでください。大きすぎる音量は、聞こえを悪くする原因となります。

※調節の音量は最大値もしくは最小値になった時、「ビー、ビー」というお知らせ音が鳴ります。

Bluetooth設定

本製品は、スマートフォン、パッド、スピーカーなどBluetooth機能を搭載している端末と無線で接続することができ、通話や音声、音楽をもっと楽しめます。

1 スマホのホーム画面の「設定」をタップします。



2 「Bluetooth」をタップします。



3 Bluetoothがオフになっている場合はオンに切り替えます。



4 本体左右の **(M)** ボタンのうち一つを約3秒間長押しします。



※ペアリングモードになると、LEDインジケータが赤/青交互に点滅します。

5

しばらくするとデバイスの項目に製品名が表示されますので、使用する製品名をタップします。



6

製品名の横に「接続済み」と表示されたら接続完了です。








※機種により手順が異なる場合があります。

・ペアリングは、一度登録すればこちらから設定を変更しない限り、端末から消えることはありません。次からは電源をオンにするだけで自動的に繋がります。

LEDインジケータについて

LEDインジケータは点灯または点滅して製品現在の状態を示します。LEDインジケータで示す製品の状態は以下の内容になります。

| LEDインジケータ | 説明 |
|--|-------------------|
|  赤/青交互に点滅 | Bluetoothペアリングモード |
|  青 2秒間隔で点滅 | 通常状態 |
|  白点滅 | 通話、音声や音楽に接続中 |
|  赤点灯 | 充電中 |
|  青点灯 | 充電完了 |

！ お手入れ方法 ！

イヤチップに耳垢が付くと音質に影響を与えてしまうことがありますので、使用后必ずきれいにしてください。


- イヤチップを取り外して、ブラシや綿棒で掃除してください。
- ティッシュペーパーや柔らかい布で、イヤチップに付いた水分や汚れを拭き取ると自然劣化を遅らせたりする事ができ、より長持ちします。
- お手入れするには、水に付けたり、家庭用洗剤（石鹼、洗剤粉など）、シンナー、アルコール、ベンジンなどは絶対に使わないでください。

使用前



必ず耳を掃除してください

使用后

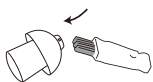

本体を柔らかい布などで、水分や汚れを拭き取ってください。イヤチップを取り外し、ブラシや綿棒を使い、耳垢やほこりを取り除いてください。

- 通常は3~6か月毎に交換する事をお勧めします。
- 汚れがひどい、または亀裂などを発覚した場合、早急に交換してください。

イヤチップ交換について

イヤチップの先端を指先でつまんで引っ張ると取れます。



新しいイヤチップの溝に本体のツバが完全に入った状態にしてください。



イヤチップ交換方法
www.mimitakara.jp

故障かと思われたときは

製品が聞こえづらくなったときは、まず下記のようにお調べください。

電池がなくなっていないですか？

いいえ

はい ↓

充電してください。

20ページ

耳垢がつまっている、もしくはゴミがつまっていますか？

いいえ

はい ↓

クリーニングしてください。

29~30ページ

正しく耳に入っていますか？

はい

いいえ ↓

きちんと耳に入れなおしてください。

23ページ

販売店にご相談ください。

音が小さい・聞こえない・音がでない

| | |
|-----------|--|
| 原因 | <ul style="list-style-type: none">・電源スイッチはオフになっている。・電池残量がなくなっている。・音量が下がりすぎている。・イヤチップがつまっている。 |
| 対策 | <ul style="list-style-type: none">・電源スイッチをオンにする。・充電してください。・音量を上げてください。(※)・イヤチップを掃除または新しいイヤチップを交換してください。 |

ハウリング音(ピーンやキーンという音)が収まらない

| | |
|-----------|---|
| 原因 | <ul style="list-style-type: none">・イヤチップが合っていない。・イヤチップが完全にはめ込まれていない。・音量が上げすぎている。・イヤチップがつまっている。 |
| 対策 | <ul style="list-style-type: none">・イヤチップを正しく耳あなに入れてください。・イヤチップの溝に本体のツバが完全に入った状態にしてください。・音量を下げてください。(※)・イヤチップを掃除または新しいイヤチップを交換してください。 |

(※) 本製品は専用アプリを使って、スマートフォンと接続・音量調節などの操作を行うことができます。

！ 通知音について ！

音量を上げる時

ビー

音量を下げる時

ビー

音量を最大にした時

ビー、ビー

音量を最小にした時

ビー、ビー

電池残量が少なくなった時

ビー、ビー

※約30秒置きに鳴ります

仕様・性能

デジタル首かけ型集音器 goodHearing A1 / UP-6EB3

※本データは密閉形擬似耳により測定・表示しております。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 規準周波数 | 1600Hz |
| 最大音響利得 | 65dB |
| 90dB入力最大出力音圧レベル | 135dB SPL (1600Hz) |
| 出力制限装置 | 内蔵 |
| 使用音調調節 | 10段階 |
| 使用電池 | リチウムイオンポリマー |
| 消費電流 | 11mA以下/3.7V |
| 電池寿命 | 約500回充放電可能 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 内蔵電池持続時間 | 約10時間 |

電池寿命の値は標準的設定における目安であり、実際の使用状況によって異なります。

保証・アフターサービス

ご使用中、もし製品に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、下記販売店にご連絡ください。

株式会社NADI

〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180

TEL:052-602-7772 / FAX:052-819-0080

<http://www.mimitakara.jp>



1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合のみ無料修理対象となります。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - 本書の提示がない場合、あるいはお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入が無い場合。
 - 本製品を本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

この説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の破損、接続機器の破損の責任は一切応じられません。

※明らかに人為的な破損による製品故障は保証対象外です。

保証期間：本体はお買い上げ日から1年間。
その他の付属品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

保証書

| | |
|-----------------|------------|
| 商品名：デジタル首かけ型集音器 | 型番：UP-6EB3 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 販売店（店名・住所・電話番号） | |

※予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。
変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。



愛を聞こえよ

Mimitakara®



Mimitakara
ホームページ



Mimitakara
Line公式アカウント

サポートセンター：052-602-7772

お問い合わせ：service@mimitakara.jp