

Mimitakara®

BTE耳かけ型 UP-6E7

商品特徴と機能


- 世界で最も一般的なBehind-The-Ear (BTE) タイプです。
- 比較的操作简单なので初心者にも安心。
- 左右兼用、スタイリッシュなデザイン。
- 音量は6段階で調節できます。
- 最大音響利得:40±5dB
- 突発的に響くような衝撃音を抑える出力制限機能搭載。
- 2つのサイズのイヤチップが付属しています。
- 安心の1年間保証付き。
※収納ケース、イヤチップ、電池などの付属品除く

付属品

収納ケース×1



各部の名称

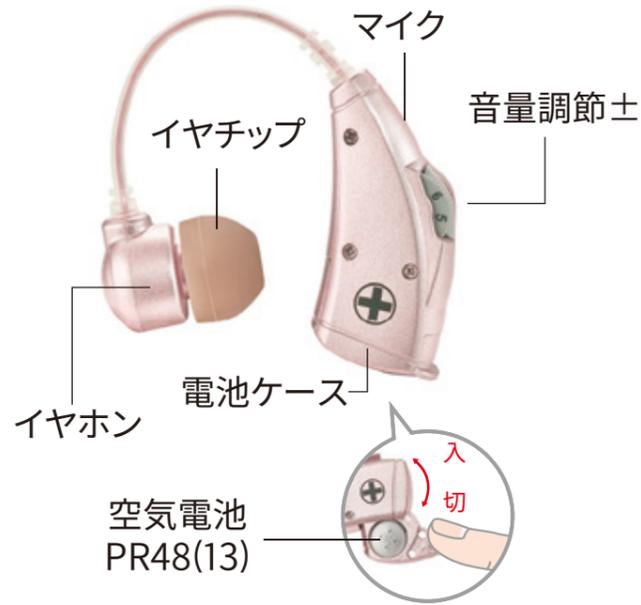

使用方法

■ 電池の交換方法

- 1、本体の電池ケースを開け、使用済みの電池を取り出します。
- 2、新しい電池の保護シールをはがし、約60秒間「通気」させます。
- 3、新しい電池を入れます。電池の(+)面を上向きの方になるように合わせてください。

■ 耳に装着する方法

- 1、イヤチップを耳あなに入れます。(※図1)
- 2、本体を耳の上に置きます。(※図2)
- 3、音量調節してください。1~6まで調節できます。(※図3)
1が最小音量、6が最大音量になります。

■ 電源を入れる方法



- 1、電池ケースを閉める。

■ 電源を切る方法

- 1、電池ケースを開ける。



電源を入れる際に、イヤホンを手で握るとハウリング音(ピンやキーンという音)が発生する場合があります。耳にセットいただくと、このハウリング音は止まります。

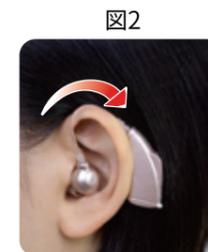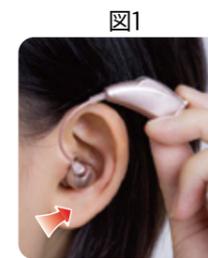

保管について

保管について

- 過度の湿気や温度を避けてください。
- 換気の良い、乾燥した涼しい場所に保管してください。

イヤチップのお手入れ

- イヤチップを本体から取り外し、水で薄めた中性洗剤に浸した布で拭きます。本体に取り付ける前に、十分に乾燥させてください。


注意事項

使用前



必ず耳を掃除してください

使用后

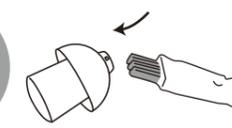

本体を柔らかい布などで、水分や汚れを拭き取ってください。イヤチップを取り外し、ブラシや綿棒を使い、耳垢やほこりを取り除いてください。

イヤチップが耳あなに正しく挿入されないとハウリング音(ピンやキーンという音)が発生する場合があります。その場合、位置や向きを調節してください。または、イヤチップのサイズを替えてください。

- 使用后、必ず電池ケースを開けて電源を切ったままにしてください。
- 電池ケースがうまく閉まらない場合には、電池が正しく収納されていないか確認してください。
- メーカー指定の電池を必ず使用してください。
- 最大音量に調節したとしても、音が聞こえない場合、新しい電池に交換してください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないようにしてください。
- 付属されている電池はテスト用のため、電池寿命が短い場合がございます。

故障かと思われたときは

製品を使用する際に、音が聞こえない、小さい、ピーピー音がするなどおかしいと思ったら、修理に出す前に以下の内容をご確認ください。ご自分で製品を分解や改造をしないでください。破損、故障の原因になります。

症状	原因	対策
音が小さい	電池残量がなくなった	新しい電池に交換してください。
	イヤチップがつまっている	イヤチップを掃除または新しいイヤチップを交換してください。
	イヤホン孔がつまっている	イヤホン孔を掃除してください。
雑音または音がでない	電池残量がなくなった	新しい電池に交換してください。
	イヤホン孔がつまっている	イヤホン孔を掃除してください。
	機械的な故障	販売店にご相談ください。
ピーピー音がする	イヤチップが合っていない	イヤチップを正しく耳あなに入れてください。または、自分の耳にあったサイズのイヤチップに交換してください。
	音量を上がりすぎている	音量を下げてください。

症状が改善されない場合は、故障の可能性がありますので販売店にご相談ください。

環境騒音について

本製品を使用する際に、はじめは小音量で使用し、製品をつけることに慣れてください。まず、静かな場所で自分の声を聴いてみたり、ご家族や友達と一対一で対談してみてください。二週間ごとに音量を段々あげて、複数の身近な人と話すを練習してください。慣れてきたら、外で環境音を聞く練習をします。

初めてお使いになる方に

製品をつけてすぐには言葉の内容が聞き取りにくいものです。慣れるまでは通常1~2週間以上かかりますが、毎日疲れない程度に、使い続けてください。

第一週目 静かな家の中などで使用し、製品を着ける事に慣れてください。 お勧め時間：毎日2時間まで	第二週目 静かな場所で家族やお友達と対談してください。 お勧め時間：毎日3時間まで
第三週目 複数の身近な人と会話する練習をしてください。 お勧め時間：毎日4時間まで	第四週目 4~5人の人と話してみます。慣れてきたら、外で環境音を聞く練習をしてください。 お勧め時間：毎日5時間まで

お手入れ方法

製品を長くご使用いただくために、日ごろからのお手入れをお勧めします。

1. 本体から電池を取り出し、ティッシュペーパーや柔らかい布で、本体と電池についての水分や汚れを拭き取ります。
2. お手入れする際には、水につけたり、家庭用洗剤（石鹼、洗剤粉など）、シンナー、アルコール、ベンジンなどは絶対使わないでください。
3. 本体を使用しない場合は電池を取り出し、収納ケースに入れてください。下記のような場所で保管しないよう、ご注意ください。
 - ー水気、湿気を避けてください。
 - ー高温になる場所や熱がこもる場所で使用、保管、放置しないでください。
 - ー子どもの手の届く所やペットの周辺に保管しないでください。

仕様・性能

基準周波数：1600Hz
最大音響利得：40±5dB
全高調波ひずみ：500Hz-4.0%以下；1600Hz-3.0%以下
電池の電流：3mA以下
使用電池：PR48(13)
電池寿命：約96時間

アフターサービス

ご使用中、もし製品に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、下記販売店にご連絡ください。

株式会社NADI
〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180
TEL:052-602-7772 / FAX:052-819-0080
<http://www.mimitakara.jp>



保証書

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合のみ無料修理対象となります。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - ・本書の提示がない場合、あるいはお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入が無い場合。
 - ・本製品を本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

この説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の破損、接続機器の破損の責任は一切応じられません。

※明らかに人為的な破損による製品故障は保証対象外です。

保証期間：本体はお買い上げ日から1年間。
その他の付属品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

商品名：BTE耳かけ型集音器	型番：UP-6E7
お買い上げ日	年 月 日
販売店(店名・住所・電話番号)	

※予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。