

取扱説明書

骨伝導式集音器

UP-6K11

準備する

1 ヘッドホンを充電する

- ① ヘッドホン本体の右側の裏に電源ボタンと充電ポートがあります。



充電ポート

電源

準備する

- ② 爪で充電ポートのフタを完全に開けてください。
※手指の操作が難しい場合は、爪楊枝の裏など尖っていない物を使用してフタを開けることも可能です。



● フタ



● 充電口

準備する

- ③ 付属の Type-C ケーブル (図 1) を USB アダプター (別途ご用意ください) に接続し、コンセントに差し込んでください (図 2)。

Type-C ケーブル (付属)



図 1

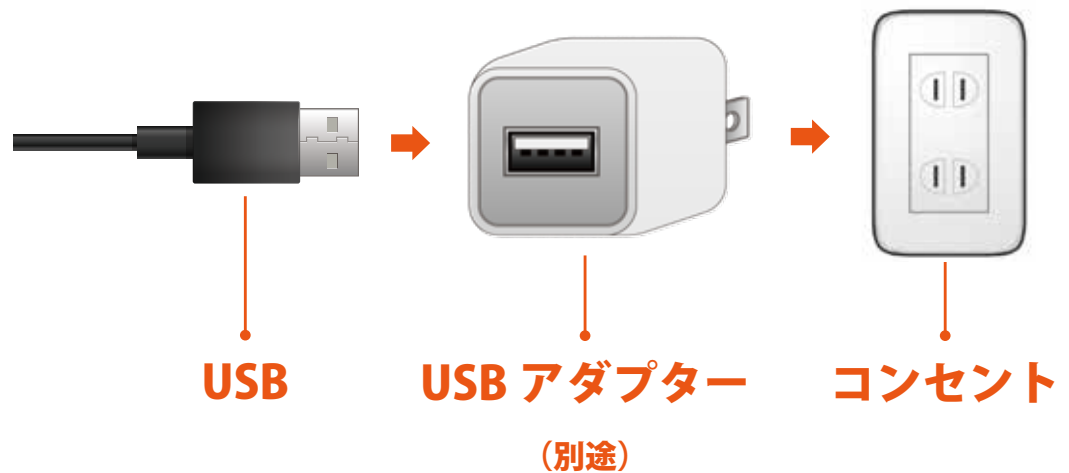



図 2

充電用の USB アダプターは付属してありません。

本商品には USB + Type-C の充電ケーブルが付属していますので、お手持ちのスマートフォン用充電器や、家電量販店で販売されている Type-C 対応のアダプターをご利用ください。

準備する

- ④ Type-C 端子をヘッドホンの充電ポートに差し込み、充電を行ってください。

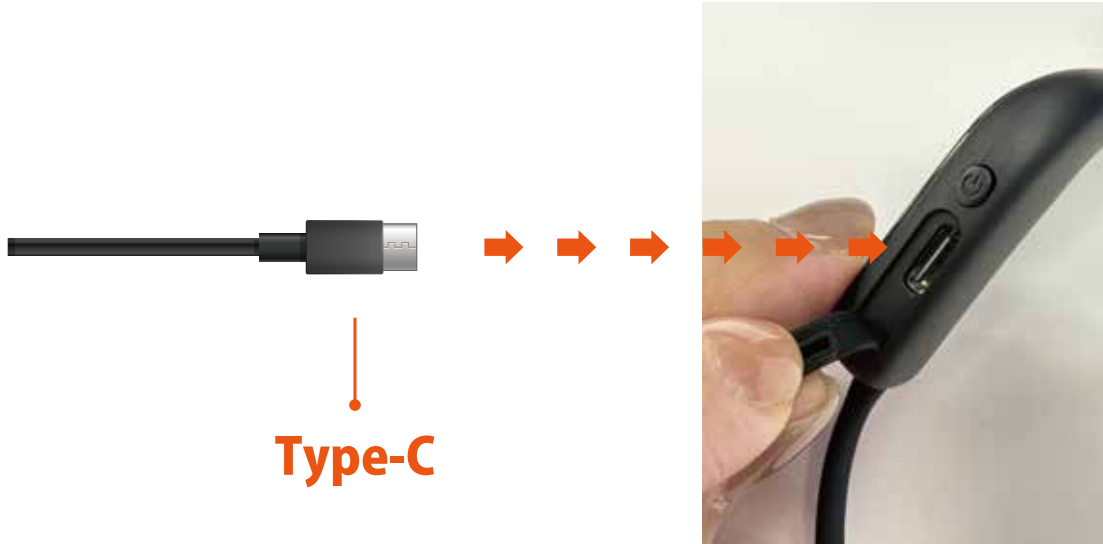

約 1.5 時間で充電できます

- ④ 笑顔のイラストランプが**点灯**から**消灯**に変わったら、充電が完了です。充電ケーブルを外し、充電ポートのフタを元に戻してください。

点灯



消灯



充電時間はあくまで目安となります。使用する電源またはアダプターの出カレベルによって、充電時間が異なる場合がございます。

2 集音マイクを充電する


- ① 集音マイク本体の上部に、Type-C の充電ポートがあります。



- ② 付属の Type-C ケーブルを USB アダプター（別途ご用意ください）に接続し、コンセントに差し込んでください。

※詳しい手順は「P3」でご確認ください。

- ③ Type-C 端子を集音マイクの充電ポートに差し込み、充電を行ってください。

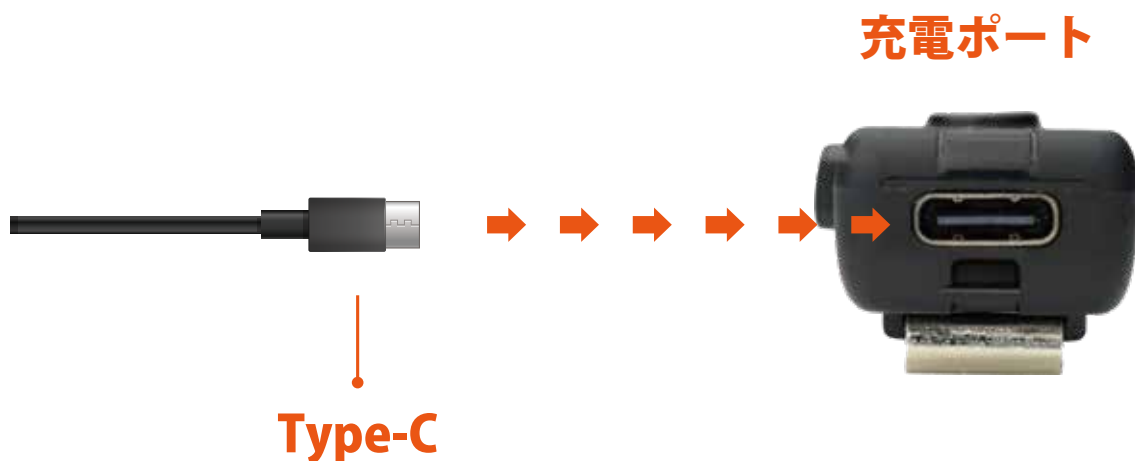

約 2 時間で充電できます

- ④ 集音マイク上部のランプが**点滅**から**消灯**に変わったら、充電が完了したことを示します。充電ケーブルを外してください。

点灯



消灯



充電時間はあくまで目安となります。使用する電源またはアダプターの出カレベルによって、充電時間が異なる場合がございます。

内蔵充電式電池の持続時間

- ヘッドホン 約 8 時間
- 集音マイク 約 8 時間

※使用環境や音量によって、持続時間が異なる場合がございます。

次に、電源を入れましょう！

電源を入れる

1 集音マイクの電源を入れてください。

- ① 集音マイク本体の正面にある電源ボタンを確認します。
- ② 電源ボタンを 5 秒以上長押ししてください。



電源を入れる

- ③ 集音マイク正面上部のランプが点滅したら、電源が正常に入っています。



次に、ヘッドホンの電源を入れましょう！

電源を入れる

2 ヘッドホンの電源を入れてください。

- ① ヘッドホン本体の右側裏にある電源ボタンを確認します。
- ② 電源ボタンを5秒以上長押ししてください。



電源を入れる

- ③ 笑顔のイラストのランプが点滅したら、電源が正常に入っています。装着したまま電源を入れると、ヘッドホンから「パワーオン」のガイダンスが聞こえます。これで電源が正常に入ったことを確認できます。

点滅



さっそく、音を聞きましょう！

周囲の音を聞く

1 ヘッドホンを耳にかけてください。



2 集音マイクを服の襟やポケットにつけてください。



周囲の音を聞く

3

音量「+/-」ボタンを押して音量を調節してください。



音量ボタン

テレビの音を聞く（ワイヤレス）

- 1 ヘッドホンを耳にかけてください。



- 2 集音マイクをテレビの近くに置いてください。

使用イメージ ① 集音マイクを音源の近くに置く



テレビの音を聞く（ワイヤレス）

3


集音マイクで調節する場合：音量「+/-」ボタンを押して音量を調節してください。

または

ヘッドホンで調節する場合は、右耳の青いパネルを指で前後にスライドして音量を調節してください。


音量減少

奥から前にスライド

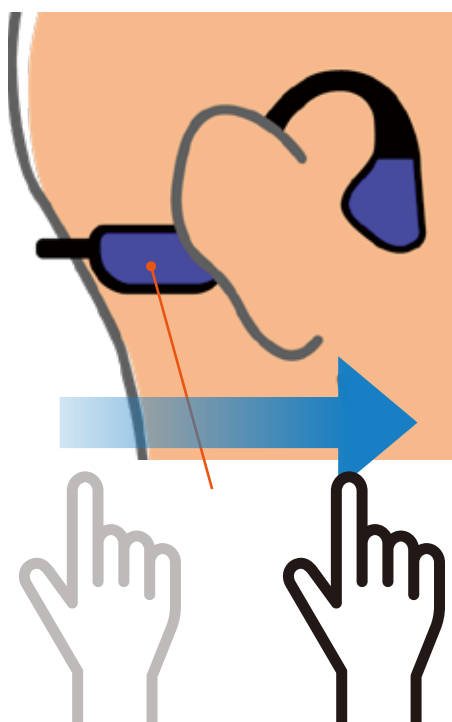

音量増加

手前から奥にスライド

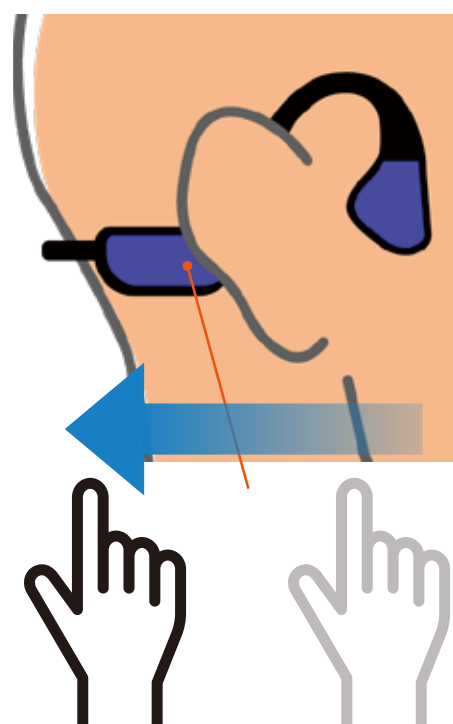


テレビの音を聞く（オーディオケーブル）

- 1 ヘッドホンを耳にかけてください。



- 2 集音マイクを、テレビ背面にある「ヘッドホン端子（ヘッドホン）」表示のある端子に付属のオーディオケーブルでしっかりと差し込みます。

※ヘッドホン端子の位置や表記はテレビのモデルにより異なります。詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

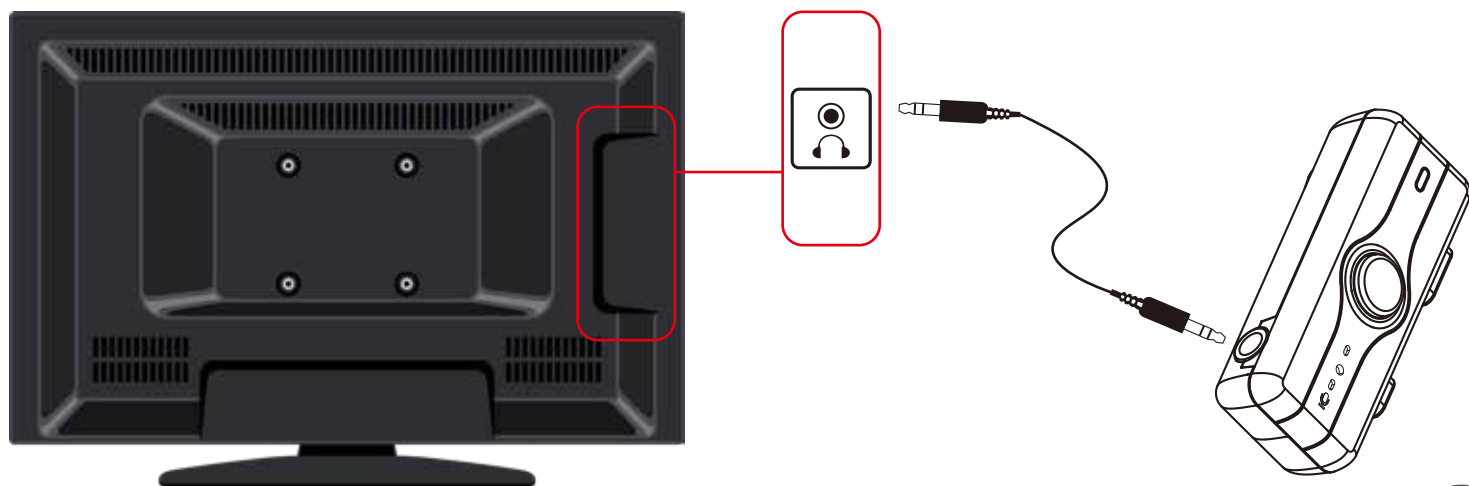

テレビの音を聞く（オーディオケーブル）

3


集音マイクで調節する場合：音量「+/-」ボタンを押して音量を調節してください。

または

ヘッドホンで調節する場合は、右耳の青いパネルを指で前後にスライドして音量を調節してください。


音量減少

奥から前にスライド

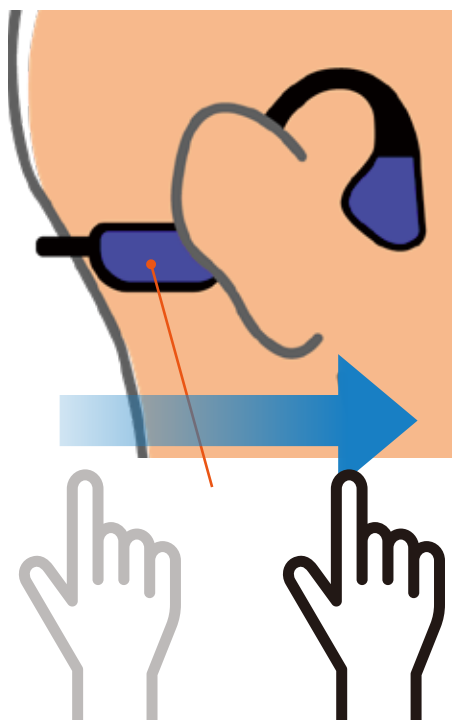

音量増加

手前から奥にスライド

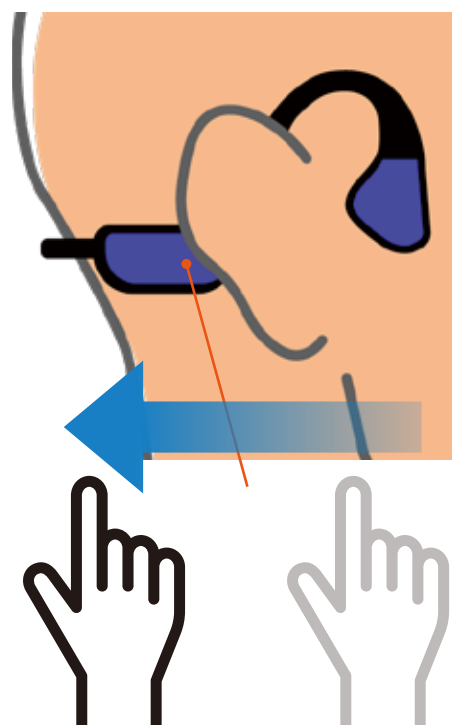

よくある質問

Q1 骨伝導ヘッドホンが骨に密着しない場合、どうすればいいですか？

A1 骨伝導ヘッドホンは、個々の頭や耳の形状によって骨に密着しない場合がございます。
ただし、弊社の商品はヘッドホンのアーム部分が調節可能な設計となっております。



よくある質問

アーム部分を上下に調節することで角度を変えられ、ヘッドホンをよりきつくして密着させることが可能です。

密着することで、骨伝導による音の伝達がよりスムーズになり、快適にお使いいただけます。



Q2 骨伝導ヘッドフォンと集音マイクが接続できません。
どうすればいいですか？

A2 骨伝導ヘッドフォンと集音マイクの Bluetooth 接続が切れた場合は、以下の手順で再ペアリングを行ってください。

1. 集音マイクリセット

- ・マイクの電源ボタンを約 10 秒間長押ししてください。
- ・緑と赤のランプが交互に点滅します。



2. ヘッドホンリセット

- ・ヘッドホンの電源ボタンを約 10 秒間長押ししてください。
- ・笑顔のイラストのランプが約 3 秒間隔で点滅します。

点滅



3. 集音マイクとヘッドホンがペアリング開始

- ・上記の操作を行うとリセットが完了し、自動的にペアリングが開始されます。
- ・マイクの緑ランプが常時点灯した場合、ペアリングが成功した状態です。